

## Oversikt over utstyr til koronavaksinering

Helsedirektoratet sørger for innkjøp og distribusjon av vaksinasjonsutstyr til koronavaksinering til kommunene. Følgende utstyr vil bli distribuert:

Vare	Enhet
Sprøyte KD-Ject Luer Lock	1 ml - esker á 100
Sprøyte KD-Ject Luer Lock	2 ml - esker á 100
Sprøyte KD-Ject Luer Lock	5 ml - esker á 100
Kanyle inj KD-Fine Safety	0,6x25mm 23G blå - esker á 100
Kanyle inj KD-Fine Safety	0,8x50mm 21G grønn - esker á 100
Opptrekkskanyle med filter	1,2x40mm 18G lilla - esker á 100
Bandasjeplaster (uten dispenser)	2,5 cm bredde x 10 m - esker á 10
Bomullsdotter	Poser á 100
Spritservietter	Esker á 100
Kanylebokser	7 L
Risikoavfall kartong gul/hvit	44 L
Risikoavfallssekk 44 L gul	Ruller á 10

### Bruksområder for sprøyter og kanyler:

- **Sprøyter 1 ml** skal brukes ved vaksinerings.
- **Sprøyter 2 ml** skal brukes ved tilsetning av sterilt saltvann til hetteglass med BioNTech og Pfizer-vaksinen Comirnaty.
- **Sprøyter 5 ml** kan ved behov brukes ved tilsetning av sterilt saltvann til hetteglass med vaksinen Comirnaty.
- **Kanyler 23G** (blå) skal brukes ved vaksinerings av normalvektige.
- **Kanyler 21G** (grønne) skal brukes ved vaksinerings av personer med mye underhudsfett, samt ved tilsetning av sterilt saltvann til hetteglass med vaksinen Comirnaty.
- **Opptrekkskanyler med filter** kan brukes ved opptrekk av vaksinedoser fra glass med ferdig blandet vaksine, for å fange ev. gummipartikler fra hetten på vaksineglasset. Opptrekkskanyler skal ikke benyttes ved utblanding og opptrekk av mRNA-vaksinene fra Moderna og BioNTech/Pfizer.