



Bruksrettleiing avføringsprøve

For information in other languages: tarmscreening.no/brev



1 I denne sendinga skal du ha fått:

- brev
- bruksrettleiing
- prøverør
- oppsamlingspapir
- plastpose med absorberande papirbit
- returkonvolutt




2 Kontroller at namnet ditt og fødselsdato er trykt på røret. Om informasjonen ikkje stemmer, må du ikkje ta prøva, men kontakta oss for å få tilsendt eit nytt rør.



3 Fest hjørna på oppsamlingspapiret direkte på toalettskåla.

Oppsamlingspapiret er klart til bruk. Unngå at det kjem urin på det.

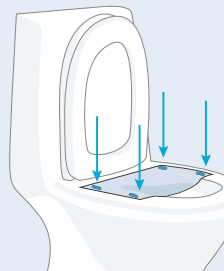

4 Om oppsamlingspapiret går sun, kan du bruke ein rein behaldar (som ei isboks) som du set ned i toalettet.




5 Skru det grønne lokket slik at røret blir opna.

Væska som allereie er i røret skal vere der.


Ta prøva med pinnen som er festa til lokket.



6 Før pinnen over overflata på avføringa i begge retningar.

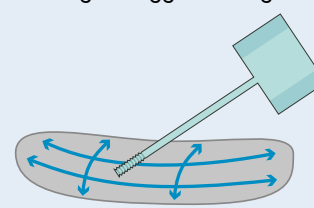


7 Det er berre rillene på pinnen som skal bli dekkja med avføring. Pass på så du ikkje får for mykje avføring på pinnen.

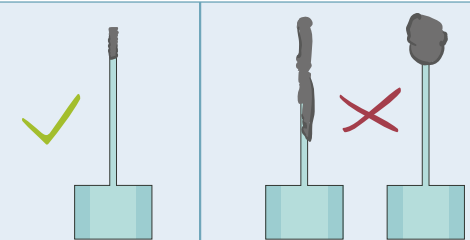

passé for mykje

8 Sett pinnen tilbake i røret.

Trykk lokket på plass til du høyrer eit klikk.

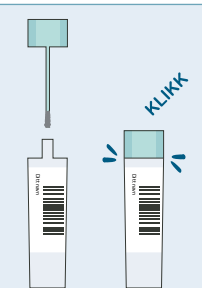


KLIKK

9 Losne papiret frå toalettskåla og skyl ned 2 - 3 gonger. Papiret vil løyse seg opp.



10 Legg røret i plastposen. La papirbiten bli verande i posen og sjekk at forseglinga er godt lukka.

Legg posen med røret i den vedlagte konvolutten. Porto er allereie betalt.

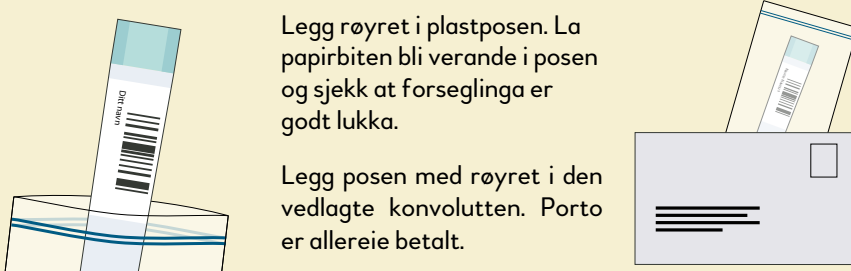

11 Brevet med prøva bør bli posta samme dag. Har du ikkje moglighet til dette, oppbevarer du prøva i kjøleskap til du får sendt ho.

12 Prøva blir analysert for blod i avføringa.

Du får svar frå oss uansett resultat.



